

# アームスリング

子供・一般用

## アームスリング

JAS-1 / ARM SLING



左右  
共通

子供  
一般

商品コード	JANコード	サイズ	左/右	カラー	適応(前腕の長さ)	入数/箱
JAS-1		S (子供)	共通	ポーチ/ ブルー ストラップ/ ホワイト	20.3-25.4cm	1入
		L (一般)			25.4-30.5cm	


◎メーカー希望小売価格/箱 **¥1,188** (本体価格¥1,100)

■用途:捻挫・骨折等の腕の固定 ■台湾製  
■GS1-128対応

- 肩鎖関節を安定した肢位に保持します。
- 肩部の位置調整可能なパットにより、肩への食い込みが軽減でき、快適な装着感を提供します。
- シンプル設計の為、1人でも簡単に着脱が可能です。
- ベロクロは、肩部のパットにも固定することができます。
- 綿45%、ポリエステル49%、ナイロン6%素材の腕つりです。
- 子供サイズと一般サイズの2種類をご用意いたしました。

### 【装着方法】

- ①負担のないように患部の腕をポーチに入れて下さい。
- ②肘はポーチのコーナー部に合わせて、ベロクロ・ストラップで高さ調節して下さい。

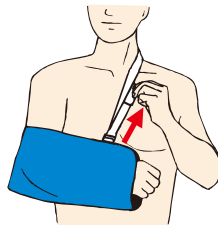

子供・一般用

## メッシュ・アームスリング

JAS-2 / MESH ARM SLING



左右  
共通

子供  
一般

商品コード	JANコード	サイズ	左/右	カラー	適応(前腕の長さ)	入数/箱
JAS-2		S (子供)	共通	ポーチ/ ネイビー ストラップ/ ホワイト	23.5-25.4cm	1入
		L (一般)			30.5-35.6cm	


◎メーカー希望小売価格/箱 **¥1,296** (本体価格¥1,200)

■用途:捻挫・骨折等の腕の固定 ■台湾製  
■GS1-128対応

- 肩鎖関節を安定した肢位に保持します。
- 肩部の位置調整可能なパットにより、肩への食い込みが軽減でき、快適な装着感を提供します。
- シンプル設計の為、1人でも簡単に着脱が可能です。
- ベロクロは、肩部のパットにも固定することができます。
- メッシュタイプのアームスリングのため、暑い日でも暑さ軽減が図れます。
- 子供サイズと一般サイズの2種類をご用意いたしました。

### 【装着方法】

- ①負担のないように患部の腕をポーチに入れて下さい。
- ②肘はポーチのコーナー部に合わせて、ベロクロ・ストラップで高さ調節して下さい。
- ③ポーチ内のループに母指を固定することも可能です。但し、医師の指示に従って下さい。

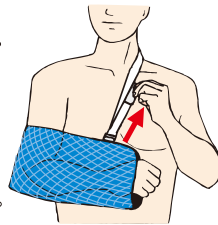

# 三角巾

不織布タイプ

## つかいきり三角巾

FR-165~167 / TRIANGULAR BANDAGE



3  
サイズ

不織布

未滅菌


商品コード	JANコード	サイズ	左/右	カラー	商品サイズ(cm)	入数/袋
FR-165		S			75×75×105cm	1入
FR-166		M	共通	ホワイト	95×95×135cm	
FR-167		L			105×105×150cm	

◎メーカー希望小売価格/袋 **¥173** (本体価格¥160)


■中国製 ■GS1-128対応

- 経済的で、しっかりとした不織布(45g/m<sup>2</sup>)素材を採用しました。
- お子様〜大人まで対応可能な3サイズをご用意いたしました。
- 止血帯や支持帯として救急用には欠かせません。
- 火災の際などは水に濡らして口に当てれば、煙を吸い込むのを防ぐのにも役立ちます。

### ●三角巾の折りたたみ方

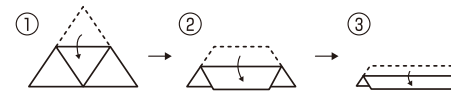

### ●三角巾のいろいろな使い方

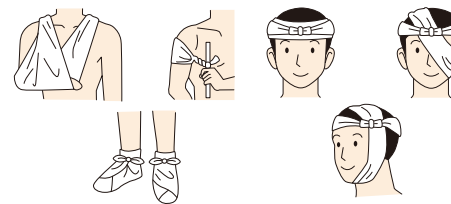

梱包単位:20袋/パック

# 鎖骨固定帯

1人でも着脱可

RENEWAL

## クラビックブレース

FR-5901 / CLAVIC BRACE

(2017年7月下旬発売予定)

S~L



(前面)

(背面)

商品コード	JANコード	サイズ	カラー	適応(胸まわり)	入数/箱
FR-5901		S	ホワイト	63.5~76.2cm	1入
		M		76.2~88.9cm	
		L		88.9~104.1cm	

◎メーカー希望小売価格/箱 **¥1,944** (本体価格¥1,800)

■台湾製 ■JAN対応

(適応範囲の上限に近いサイズの方は、大きいサイズをお選び下さい。)

- しっかりとした肩パッドで、的確な外転保持力と圧迫が得られます。
- クッション性と肌当りに優れた素材により、快適な装着感を提供します。
- ストラップテープにより、簡単に着脱ができます。

### 【装着方法】

- ① ショルダーの輪に自分の通しやすい方の腕から通して下さい。
- ② 両方の腕を通したら最後に仮止めをはずして、横に向けて引っぱり適正位置が決まったらもう1度ストラップをとめて固定して下さい。